

PROCEDIMENTO DE COLETA - SWAB OCULAR

Identificar cada amostra e o formulário de requisição do exame com os dados do animal, de forma clara e legível.

* Não enviar swabs de madeira ou com alginato de cálcio.

1. Utilizar um swab estéril com haste de plástico;
2. Retirar o excesso de secreção purulenta com gaze estéril;
3. Com uma das mãos, afastar as pálpebras superior e inferior.
4. Passar o swab na mucosa conjuntival e no ângulo nasal, friccionando suavemente, tocando toda a extensão da mucosa;
5. Manter sob refrigeração até o envio;

Se houver indicação, colher um swab para cada olho, assinalando o lado direito e esquerdo.



PROCEDIMENTO DE ENVIO

1. Colocar a amostra dentro de um saco plástico completamente vedado de forma que não deixe entrar ou escapar o ar;
2. Acomodar em caixa isotérmica (isopor) resistente e em boas condições;
3. Utilizar gelo seco ou reciclável em quantidade compatível com o tempo de transporte até o laboratório;
4. Não deixar o gelo em contato direto com a amostra;
5. Preencher os espaços vazios com materiais macios (folhas de papel, jornal ou isopor);
6. Colocar o formulário do exame e o comprovante de pagamento devidamente preenchidos, em um saco plástico transparente e fixar na parte externa da tampa da caixa isotérmica;
7. Fechar a caixa com fita adesiva e identificá-la com nome, endereço e telefone do remetente e do destinatário;
8. A amostra deve ser enviada preferencialmente, por transportadora ou correios (Sedex).