

### **PROCEDIMENTO DE COLETA PARA URINA**

Durante a colheita identificar cada amostra e o formulário de requisição do exame com os dados do animal, de forma clara e legível.

1. A amostra de urina pode ser obtida da micção espontânea, por micção induzida, por punção vesical ou mediante sonda uretral;
2. Colher o jato intermediário da urina com coletor universal estéril, encontrado em farmácias;
3. Volume mínimo de urina 3 mL;
4. Manter a amostra refrigerada até o momento do envio.



### **PROCEDIMENTO DE ENVIO**

1. Colocar o coletor com amostra dentro de um saco plástico completamente vedado de forma que não deixe entrar ou escapar o ar;
2. Acomodar em caixa isotérmica (isopor) resistente e em boas condições;
3. Utilizar gelo seco ou reciclável em quantidade compatível com o tempo de transporte até o laboratório;
4. Não deixar o gelo em contato direto com a amostra;
5. Preencher os espaços vazios com materiais macios (folhas de papel, jornal ou isopor);
6. Colocar o formulário do exame e o comprovante de pagamento devidamente preenchidos, em um saco plástico transparente e fixar na parte externa da tampa da caixa isotérmica;
7. Fechar a caixa com fita adesiva e identificá-la com nome, endereço e telefone do remetente e do destinatário;
8. A amostra deve ser enviada preferencialmente, por transportadora ou correios (Sedex).